

POWER SETTINGS - TABLE-TOP DEVICES / TABLEAU DE REGLAGES - APPAREILS DE TABLE

	Tips / Inserts	NEWTRON® BOOSTER NEWTRON® P5 NEWTRON® P5XS	PMax XS P5 NEWTRON® P5 NEWTRON® XS	SUPRASSON® PMax PROPHY Max	P5 BOOSTER	PIEZOTOME®* IMPLANTCENTER™* PIEZOTOME® 2* IMPLANTCENTER™ 2*	IRRIGATION
PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE	1 / 2 / 3 / 1S	14	14	5	10	5	↕
	10P	14	14	5	10	5	↕
	10X / 10Z	12	12	2	9	2	↕
	EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR	12	12	2	9	2	↕
PERIODONTICS PARODONTIE	H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R	2	2	2	1	2	↕
	P2L / P2R	3	3	3	2	3	↕
	TK1-1S	2	2	2	1	2	↕
	TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R	2	2	2	1	2	↕
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT	PH1 / PH2L / PH2R	2	2	3	2	3	↕
	IP1	3	3	3	N/A	3	↕
	IP2L / IP2R / IP3L / IP3R	5	5	4	N/A	4	↕
ENDODONTICS ENDODONTIE	CAP1	10	10	6	7	6	↕
	CAP2 / CAP3	10	10	6	7	6	↕
	ET18D	10	10	6	7	6	↕
	ET20 / ET25 / ET25S / ETBD	7	7	3	5	3	↕
	ET20D / ET25L / ET40 / ET40D	7	7	3	5	3	↕
	IRR20-21/ IRR20-25 / IRR25-21 / IRR25-25	9	9	5	7	5	↕
	K10 / K15 / K25 / K30	6	6	1	4	1	↕
	AS3D / AS6D	7	7	3	5	3	↕
	AS9D	6	6	1	4	1	↕
	ASLD / ASRD	7	7	3	5	3	↕
	P14D / S12-70D	7	7	3	5	3	↕
	P15LD / P15RD	7	7	3	5	3	↕
	SO4	7	7	3	5	3	✕
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHESES & ESTHETIQUE	PM1 / PMS1	15	15	6	11	6	↕
	PM2 / PMS2	10	10	6	7	6	↕
	PM3 / PMS3	8	8	4	6	4	↕
	PM4	15	15	5	10	5	↕
	PMV1 / PMV2 / PMV3	15	15	5	10	5	↕
	PMV4 / PMV5 / PMV6	10	10	6	7	6	↕
	5AE / ETPR	20	20	10	14	10	↕
	C20	11	11	1	8	1	✕

*Medical devices equipped with Newtron® handpiece and used in Newtron® mode / Dispositifs médicaux équipés d'une pièce à main Newtron®, à utiliser en mode Newtron®

Power Modes / Modes de Puissance

NEWTRON®: Low / Basse - Medium / Moyenne - High / Haute - Very high / Très haute

Power Settings Scale / Echelle de Réglages

NEWTRON® BOOSTER / NEWTRON® P5 / NEWTRON® P5XS / P5 NEWTRON® (LED) / P5 XS NEWTRON® (LED) / P-Max XS / IMPLANTCENTER™ Cube: from 1 to 20 depending on clinical range / de 1 à 20, couvre toutes les gammes
SUPRASSON P-Max / PROPHYMax / PIEZOTOME® / IMPLANTCENTER™ / PIEZOTOME® 2 / IMPLANTCENTER™ 2: from 1 to 10 in each clinical range / de 1 à 10 dans chaque gamme
P5 BOOSTER: from 1 to 14 depending on clinical range / de 1 à 14, couvre toutes les gammes

See individual medical device instructions manuals for further informations on [satelec.com/documents](https://www.satelec.com/documents).
Lire attentivement le manuel d'utilisation du dispositif médical, pour de plus amples informations sur [satelec.com/documents](https://www.satelec.com/documents).



PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE	<i>Scaling Détartrage</i>						
		1 - F00246	2 - F00247	3 - F00248	10P - F00253	10Z - F00254	
	<i>Hygiene Hygiène</i>						
		1S - F00245	10X - F00359				
	<i>Excavus</i>						
		EX1 - F02040	EX2 - F02041	EX3 - F02042	EXL - F02044	EXR - F02043	
PERIODONTICS PARODONTIE	<i>Periodontics Parodontie</i>						
		H3 - F00369	H4L - F00114	H4R - F00115	H1 - F00366	H2L - F00367	H2R - F00368
	<i>Periomaintenance BDR</i>						
		TK1-1S - F01001	TK1-1L - F01004	TK2-1L - F02162	TK2-1R - F02161		
	<i>PerioPrecision</i>						
		P2L - F00090	P2R - F00091				
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT	<i>PerioSoft</i>						
		PH1 - F00702	PH2L - F00705	PH2R - F00706			
	<i>ImplantProtect</i>						
		IP1 - F02121	IP2L - F02122	IP2R - F02123	IP3L - F02124	IP3R - F02125	
ENDODONTICS ENDODONTIE	<i>Endosuccess Canal Access Prep</i>						
		CAP1 - F88181	CAP2 - F88182	CAP3 - F88183			
	<i>Endosuccess Retreatment</i>						
		ET18D - F88017	ETBD - F88020	ET20 - F88011	ET20D - F88013	ET25S - F88021	ET25 - F88018
	<i>IrriSafe K Files / Limes K</i>						
		IRR20-21 - F43807 IRR20-25 - F43808	IRR25-21 - F43805 IRR25-25 - F43806	K10-21 - F43710 K10-25 - F43712	K15-21 - F43715 K15-25 - F43717	K25-21 - F43725 K25-25 - F43727	K30-21 - F43730 K30-25 - F43732
	<i>Endodontics Endodontie</i>						
		ET25L - F88022	ET40 - F88012	ET40D - F88014	SO4 - F88009		
	<i>Endosuccess Apical Surgery</i>						
		AS3D - F00065	AS6D - F00079	AS9D - F00067	ASLD - F00080	ASRD - F00081	
	<i>Endosurgery</i>						
		S12-70D - F000118	P14D - F00106	P15LD - F00107	P15RD - F00108		
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHÈSES & ESTHÉTIQUE	<i>PerfectMargin Rounded</i>						
		PM1 - F02250	PM2 - F02251	PM3 - F02252	PM4 - F02253		
	<i>PerfectMargin Shoulder</i>						
		PMS1 - F02254	PMS2 - F02255	PMS3 - F02256			
	<i>PerfectMargin Veneers</i>						
		PMV1 - F02021	PMV2 - F02022	PMV3 - F02023	PMV4 - F02024	PMV5 - F02025	PMV6 - F02026
	<i>Loosening & Condensation Descellement & Condensation</i>						
		5AE - F00249	C20 - F00113	ETPR - F88019			